

**Westfalen Medical BV**

Rigastraat 14

7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 625

Fax 0570 - 858 451

www.cpapinfo.nl

cpapinfo@westfalen.com

## Instructiekaart aansluiten zuurstof op CPAP met de Climate Line Air Oxy tube

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP-apparaat wanneer u gebruik maakt van de Climate Line Air Oxy tube. De Climate Line Air Oxy tube kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ResMed AirSense 10.

**Let op:** Het is erg belangrijk dat er geen zuurstof in de CPAP kan stromen. Als dit gebeurt dan kan er een storing optreden. Om dit te voorkomen is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst de CPAP in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna de CPAP uit.

<p><b>1.</b> ResMed AirSense 10.</p> 	<p><b>2.</b> Sluit de Climate Line Air Oxy tube aan op de luchtuitlaat.</p> 	<p><b>3.</b> Zuurstofconnector (aansluiting voor de zuurstofslang).</p> 
<p><b>4.</b> Verwijder het dopje.</p> 	<p><b>5.</b> Sluit de zuurstofslang aan op de zuurstofconnector.</p> 	 <p><b>Westfalen</b> medical</p> <p>Neem bij vragen of twijfel contact met ons op.</p>  0570 - 234 625