

## Dagelijks gebruik van uw bevochtiger

**Elke ochtend:** het overblijvende water verwijderen en de binnenkant van het reservoir reinigen met een mild reinigingsmiddel of hypoallergene zeep (let erop een zacht detergent te gebruiken) en vervolgens goed naspoelen. Het reservoir laten drogen.

**Elke avond:** Elke avond het reservoir vullen met gekookt afgekoeld kraanwater of flessenwater (kies één van de minder mineraalhoudende soorten bronwater).

**Let op:** gebruik in geen geval gedemineraliseerd huishoudwater (water bedoeld voor elektrische huishoudtoestellen).



## Verwarmde slang ClimateLine Air™ (optie)

Met de optie 'Auto' zorgt het toestel voor een constante temp van 27 graden met de daarbij behorende bevochtiging. Dit is de geadviseerde instelling voor de meest optimale mate van comfort en voorkomt condensvorming. Indien gewenst kunt u de temperatuur aanpassen met waardes tussen de 16 en 30 graden.

Om deze optie te activeren bevestigt u de ClimateLine Air verwarmde slang aan de achterkant van het toestel en stelt u de temperatuurwaarde in tussen 16°C en 30°C in het menu "Mijn opties".



Meer informatie vindt u op onze website:

[www.resmed.com](http://www.resmed.com)


Deze infobrochure kan de uitgebreide handleidingen en reinigingsinstructies van bovenvermelde producten niet vervangen.




# De verwarmingsopties van uw bevochtiger instellen

## Bevochtiging door middel van standaard slang


De bevochtiger van uw Airsense10-toestel is ingesteld door uw zorgverlener. U kunt echter bepaalde instellingen aanpassen om uw behandeling comfortabeler te maken.

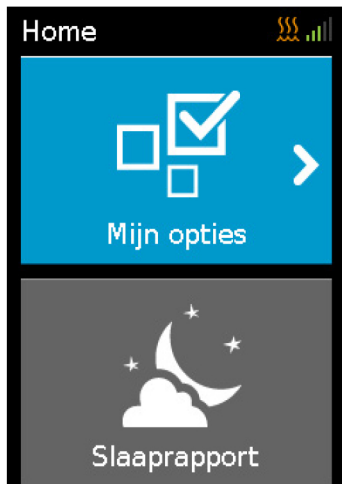


Kies "Mijn opties" met behulp van de draai-druk knop.

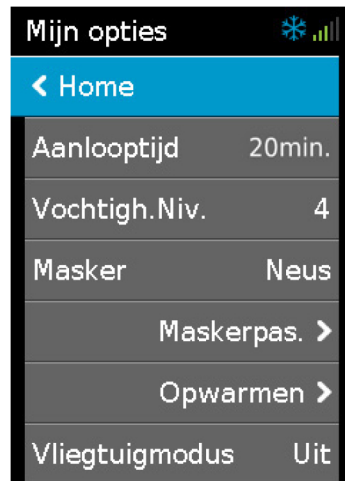

Het scherm geeft nu uw huidige instellingen weer.

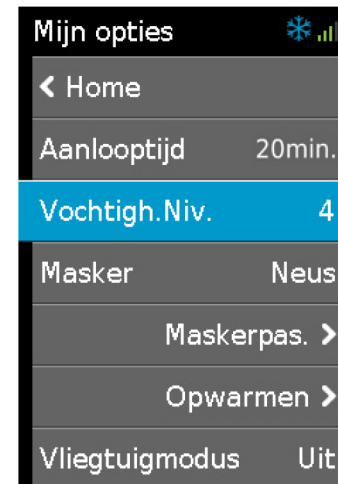

In "Mijn opties" draait u de draai-druk knop om "Vochtigh.Niv." te selecteren en drukt u vervolgens op de draai-druk knop.

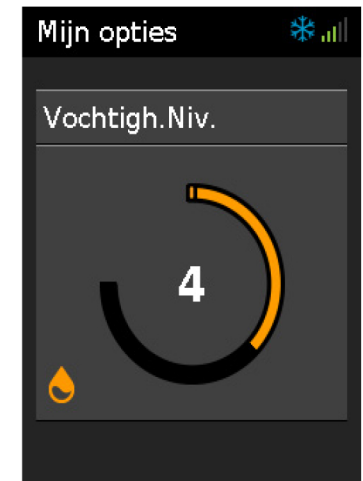

Draai nu aan de draai-druk knop om het vochtigheidsniveau in te stellen en druk op de draai-druk knop om de nieuwe instelling te bewaren.

- ✓ **Verhoog het vochtigheidsniveau** als u nog steeds last heeft van een droge keel/neus.
- ✓ **Verlaag het vochtigheidsniveau** als u een loopneus heeft of als er condensatie verschijnt in uw masker of in uw luchtslang.

**Knop Start/Uit**  
om de behandeling te starten.



**Draai-druk knop**  
om de opties te selecteren en aan te passen.

**Home knop**  
om op elk moment terug te keren naar het scherm Home.

### Water opwarmen:

Met deze functie kan u het water opwarmen alvorens het toestel te starten, zodat de lucht niet koud of droog is aan het begin van uw behandeling.

Om deze functie te activeren, kiest u in "Mijn opties" met de draai-druk knop "Opwarmen" en bevestigt u uw keuze door op "OK" te drukken.

