



Westfalen
medical

Zorgt voor lucht in uw leven







Gebruiksaanwijzing Philips NightBalance

Gebruiksaanwijzing Philips NightBalance

Voor een goede werking van de Philips NightBalance is het belangrijk dat u het apparaat op de juiste manier gebruikt. In onze gebruiksaanwijzing leest u stap voor stap hoe u dat moet doen.

Stap 1: De borstband plaatsen


1. Wikkel de borstband rond uw borst. Het wordt aanbevolen de borstband op de blote huid te plaatsen. Indien de borstband te kort is, verstelt u de band.
2. Haak de gesp door de opening.
3. Verstel de borstband door de klittenbandpositie aan te passen. De borstband moet voldoende strak zitten om te blijven zitten en tegelijkertijd comfortabel aanvoelen om te dragen.
4. Zorg dat het apparaatvakje in het midden onder uw borst zit.

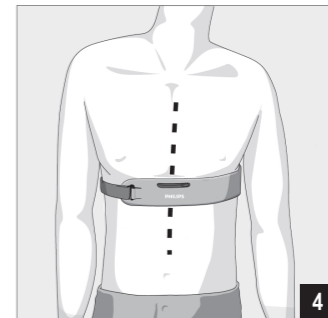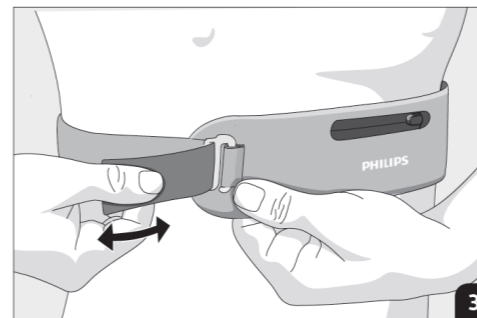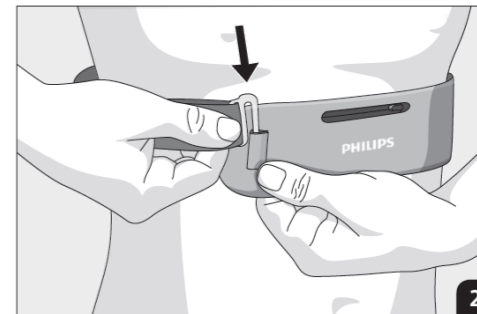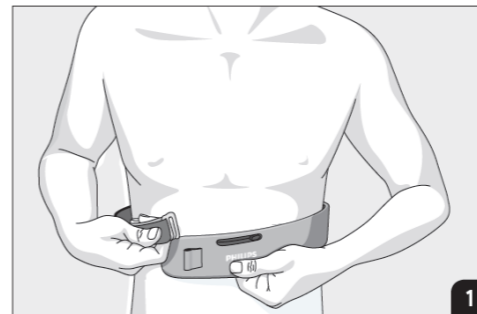

Vorbereiden op een optimale nachtrust

Stap 2: Plaatsing van de sensor

1. Start de sensor op door de aan/uit schakelaar naar de aan-stand te schuiven.
2. Controleer of het witte led-lampje op de sensor begint te knipperen. Dit wijst erop dat de sensor is ingeschakeld. Zorg dat de sensor is opgeladen voordat u deze tijdens het slapen gebruikt.
3. Plaats de sensor in het apparaatvakje op de borstband.
4. Zorg dat de knoppen van de sensor bovenaan zitten en dat het beeldscherm naar voren wijst. Sluit de rits van de zak van de borstband.

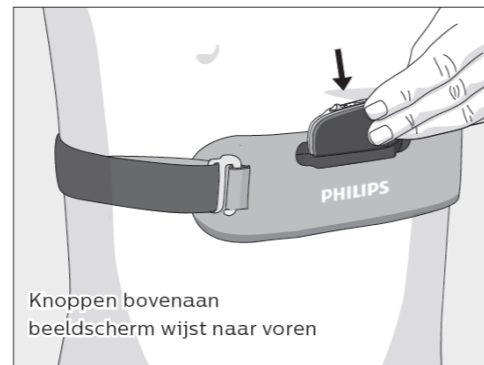

Tip: Pauze-modus activeren In de pauze-modus geeft de sensor 5 minuten lang geen vibraties. De pauze-modus wordt geactiveerd doordat u's nachts opstaat of wanneer u het apparaatvakje van de borstband een seconde verticaal draait.

Stap 3: Slapen met de sensor

1. 15 minuten na het inschakelen van de sensor begint de behandeling.
2. Zodra de sensor vibreert dient u op uw zij te gaan liggen. NightBalance regelt de intensiteit van de vibraties op basis van uw slaappgedrag. De sensor vibreert niet tijdens de eerste twee nachten van de behandeling.

Slaapgegevens van kort gebruik (< 2 uur) worden uitgesloten van gegevensberekeningen.

Stap 4: Verwijderen van de sensor

1. Gebruik de gesp om de borstband te verwijderen.
2. Haal de sensor uit de borstband.
3. Bekijk desgewenst de slaapgegevens van de afgelopen nacht op het beeldscherm van de sensor.
4. Schakel de sensor uit door de aan/uit schakelaar in de uit-stand te schuiven.
5. Controleer of het witte led-lampje op de sensor stopt met knipperen. Dit wijst erop dat de sensor is uitgeschakeld.

Het kan enige tijd duren voordat de led wordt uitgeschakeld in het geval dat de sensor gegevens doorstuurt.

Synchroniseren met uw mobiele telefoon

Wij adviseren u de sensor dagelijks te synchroniseren met uw mobiele telefoon. Dit garandeert dat uw behandelingsgegevens up-to-date zijn.

De sensor handmatig synchroniseren

Zorg dat de app beschikbaar is:

- Bluetooth is geactiveerd op uw mobiele telefoon;
- U bent aangemeld op de Philips NightBalance app en uw sensor is gekoppeld aan uw mobiele telefoon;
- De app is geopend of is actief op de achtergrond van uw mobiele telefoon;
- Sensor en mobiele telefoon zijn binnen bereik (max. 5 meter) van elkaar.

1. Schakel de sensor aan, wacht enkele seconden en schakel de sensor opnieuw uit. Het synchroniseren moet automatisch starten.

De Philips NightBalance app geeft aan wanneer de laatste succesvolle gegevensoverdracht plaatsvond. Ga naar 'profiel' en klik op 'sensor'.

2. Na het synchroniseren van uw behandelingsgegevens met uw mobiele telefoon, kunt u uw behandelingsgegevens in de tabbladen 'Nachtweergave' en 'Weekweergave' bekijken.



Schoonmaakinstructies

Hoe reinig ik het apparaat en de accessoires?

- De borstband kunt u desgewenst wassen in de wasmachine op 30 graden met een mild wasmiddel dat geen chloor bevat. Gebruik hierbij ook geen wasverzachter.
- Laat de borstband na het wassen drogen aan de lucht.
- Stop de borstband nooit in de wasdroger. En strijk de borstband niet.

Let op! Plaats nooit de sensor in een vochtige of natte borstband.

Docking station

- Het docking station houdt u stofvrij.
- Schakel de apparatuur uit en haal de stekkers uit het docking station en het stopcontact voordat u het gaat reinigen.
- Wanneer het sensorapparaat en het docking station zichtbaar vervuild zijn, reinigt u alles met een lichtvochtige doek, desgewenst met mild schoonmaakmiddel. Gebruik hierbij géén chloor of andere agressieve reinigingsmiddelen.
- Zorg dat het vocht niet in de openingen binnendringt.





Technische specificaties

Sensor	
Afmetingen:	6.9 x 4.5 x 1.4 cm
Gewicht:	30 gr
Voedingsbron:	Lithiumpolymeer, 3.7V, 165mA
Materiaal:	ABS, PMMA

Borstband	
Afmetingen:	149.0 x 7.0 x 0.3 cm
Gewicht:	62 gr
Materiaal:	Polyamide, Polyester, Lycra, Polyurethaan, Silicone

Docking station	
Afmetingen:	10.2 x 8.3 x 3.2 cm
Gewicht:	85 gr
Materiaal	ABS, PC
Stroomadapter	Voedingsbron: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.27-0.15A Uitgang: 5.0V DC, 2.0A, 10W MAX

Reisetui	
Afmetingen:	20.0 x 17.0 x 6.8 cm
Gewicht:	250 gr
Materiaal:	Nylon, Polyester, EVA



Westfalen
medical

Zorgt voor lucht in uw leven

Westfalen Medical BV

Rigastraat 14

7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 625

Fax 0570 - 858 451

www.cpapinfo.nl

spt@westfalen.com